

# Phonak TVLink II

Quick setup guide / Schnellstartanleitung


Guide d'installation rapide / Stručný návod na použití




**PHONAK**  
life is on




Components  
Komponenten  
Composants  
Komponenty

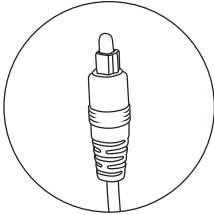



Optický kábel

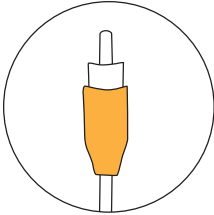

Koaxiálny kábel

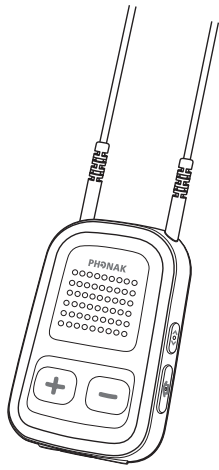

ComPilot II

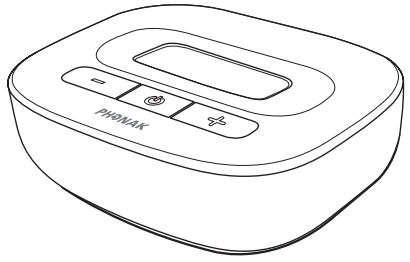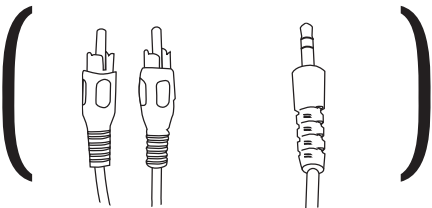



Phonak TVLink II  
základňa

Connect power and audio cable


Netzteil und Audio-Kabel anschliessen

Connectez le câble d'alimentation et le câble audio

Zapojte sieťový a audio kábel

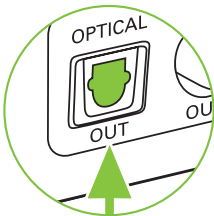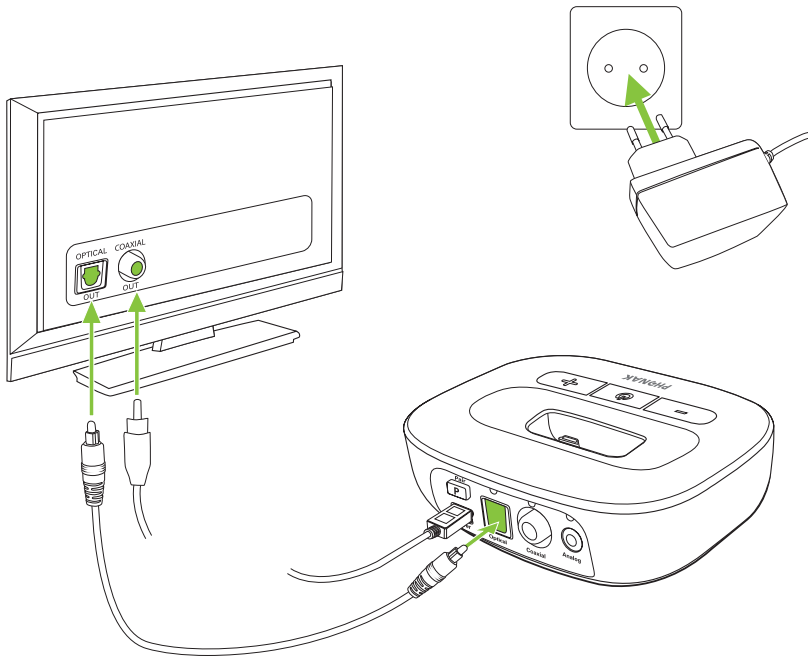

or  
oder  
ou  
alebo

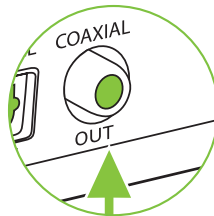


## 2

Charge 1 hour

1 Stunde laden

Chargez 1 heure

Nabijte zariadenie (1 hodina)



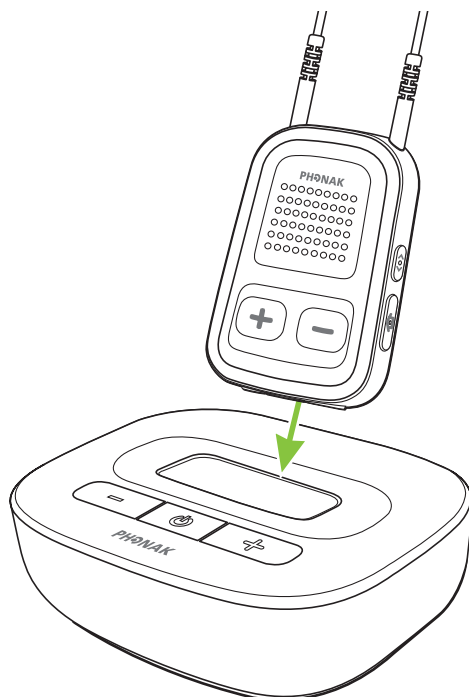


Wearing ComPilot II


ComPilot II tragen

Portez ComPilot II



Nosenie zariadenia ComPilot II

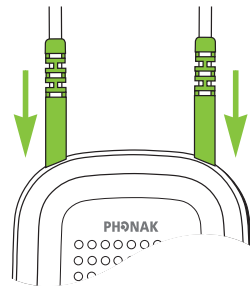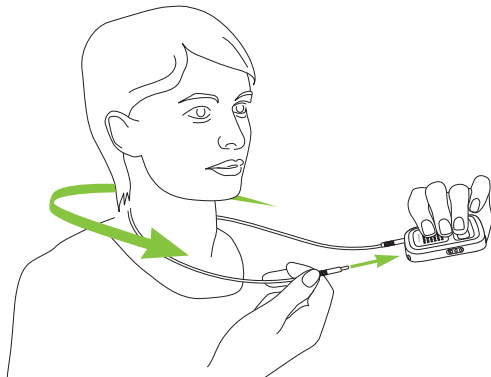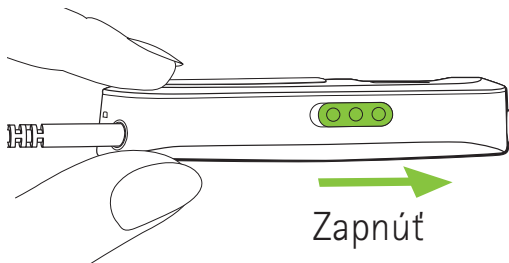


Switch on TVLink II  
TVLink II einschalten  
Mettez TVLink II en marche  
Zapnete zariadenie TVLink II

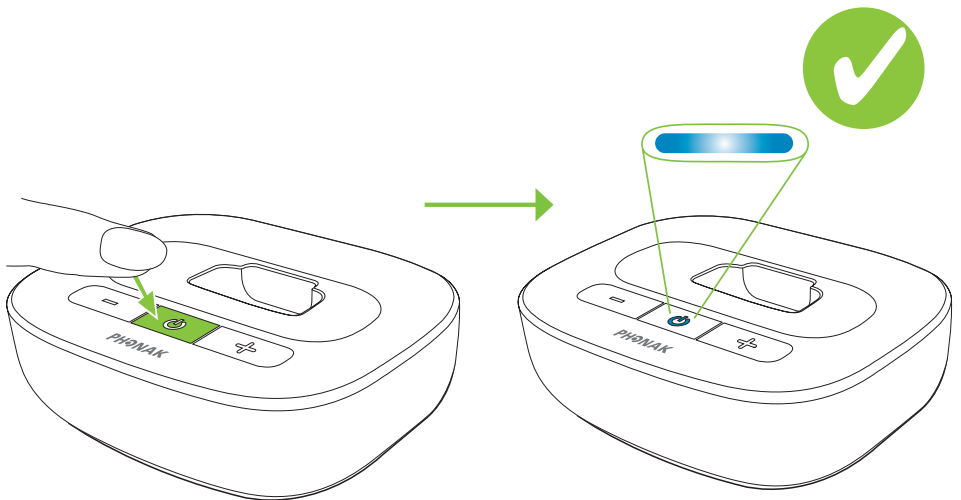


Usage  
Benützung  
Utilisation  
Používanie

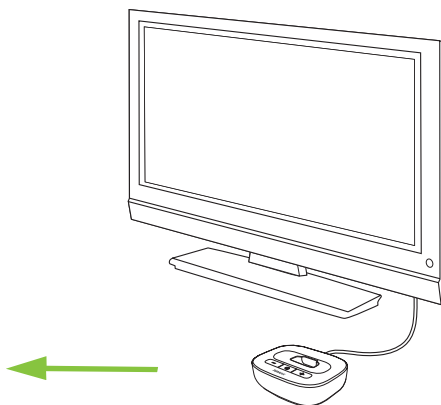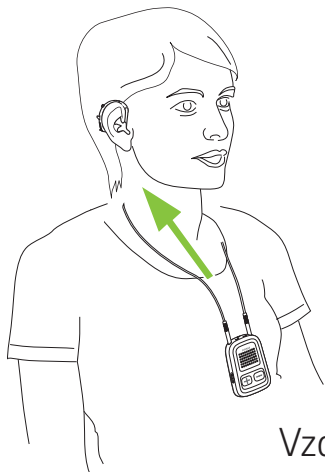

Vzdialenosť až 30 metrov

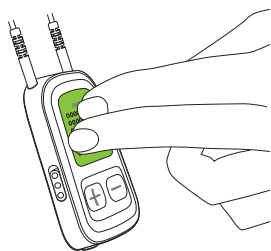

Pause / Resume  
Pause / Abspielen  
Pause / Diffuser  
Prerušit / Pokračovať

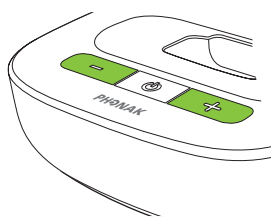

Volume setting  
Lautstärke einstellen  
Réglage de volume  
Nastavenie hlasitosti





The Phonak TVLink II user guide will give you detailed information about the installation.

Die Phonak TVLink II Gebrauchsanweisung informiert detailliert über die Installation.

Le mode d'emploi Phonak TVLink II vous donne des informations détaillées sur l'installation.

Podrobné informácie k používaniu zariadenia Phonak TVLink II nájdete v príslušnej užívateľskej príručke.



ON  
Ein  
Marche  
Zapnuté




No audio signal  
Kein Audiosignal  
Pas de signal audio  
Bez zvukového signálu



Audio transmission  
Tonübertragung  
Transmission audio  
Prenos zvuku



Pause  
Pause  
Pause  
Prerušenie prenosu

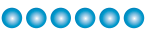

Pairing  
Koppeln  
Couplage  
Párovanie

---

## Servis a záruka

Na výrobok je poskytovaná záručná doba v súlade s platným občianskym zákonníkom SR, ktorá vstupuje v platnosť v deň nákupu.

Táto záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené nevhodným zaobchádzaním alebo starostlivosťou, vystavením chemikáliám, ponorením do vody alebo nadmerným namáhaním. Poškodenie spôsobené okolnosťami ako napr. pádom na zem, vypraním, rozšliapnutím, rozhryznutím od zvierata, vysúšaním v mikrovlnnej rúre a pod. nie je predmetom poskytnutej záruky. Záruka stráca platnosť pri škodách spôsobených tretími stranami alebo neautorizovaným servisom. Táto záruka sa nevzťahuje na servisné zásahy prevedené poskytovateľom zariadenia na jeho prevádzke.

Záručný list musí byť riadne a čitateľne vyplnený vrátane dátumu zakúpenia, podpisu a pečiatky predajcu.

Táto záruka sa vzťahuje na zariadenie značky Phonak, ktoré je uvedené nižšie.

Sériové číslo zariadenia: \_\_\_\_\_

Dátum zakúpenia: \_\_\_\_\_

Pečiatka a podpis predajcu: \_\_\_\_\_

---

# Distribútor

## **Artsonic s. r. o.**

Sídlo:

Radlinského 27

811 07 Bratislava

IČO: 52 800 008, IČ DPH: SK2121165783

zapísaná v obchodnom registri vedeného u Okresného súdu v Bratislave 1, oddiel: SRO, vložka č. 142695/B

## **Centrálny servis:**

Akustik plus s. r. o.

Krížna 5

811 07 Bratislava

tel.: SK 02 554 24 272

e-mail: [akustik@akustik.sk](mailto:akustik@akustik.sk), [servis.phonak@akustik.sk](mailto:servis.phonak@akustik.sk)

Facebook: [@PhonakSlovensko](#)

You Tube: [Phonak CZ/SK](#)

**Kontaktné a servisné formuláre:** [www.akustik.sk](http://www.akustik.sk)

## **Doplňky pre načúvacie prístroje:**

batérie, čistiace prostriedky, diaľkové ovládanie, príslušenstvo pre počúvanie televízie, telefonovanie, bezdrôtová komunikácia a iné [www.audiodom.sk](http://www.audiodom.sk)

© Kopírovanie časti a/alebo celej tejto príručky je možné len so súhlasom spoločnosti Artsonic s. r. o.

---

# Vyhlásenie o zhode

Spoločnosť Phonak AG so sídlom Laubisrütistrasse 28, 8712 Stäfa, Švajčiarsko týmto na svoju vlastnú zodpovednosť vyhlasuje, že:

- výrobok Phonak TV Link II je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ o rádiových zariadeniach,
- zdravotnícky prostriedok ComPilot II je v súlade so smernicou 93/42/EHS o zdravotníckych prostriedkoch a smernicou 2014/53/EU o rádiových zariadeniach.





Autorizovaný predajca:



**Distibútor pre Slovenskú republiku:**

**Artsonic s. r. o.**

so sídlom Radlinského 27,

811 07 Bratislava

[www.artsonic.sk](http://www.artsonic.sk)

[www.phonak.sk](http://www.phonak.sk)



**Výrobca:**

Phonak AG

Laubisrütistrasse 28

CH-3280 Stäfa

Švajčiarsko

[www.phonak.com](http://www.phonak.com)

029-0319-Slovak/V1.00/2021-07/A+W/SB © Sonova AG All rights reserved

